


湯沢商工会議所会員限定 お得なお知らせ

従業員の福利厚生にいかがですか？

だ液

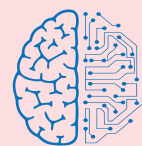

AI

(人工知能)

自宅で完結！



部位ごとにわかる

ネットで話題の！

がんリスク検査

SalivaChecker®

サリバチェッカー

かんたん
3ステップ

ストローを通して
だ液をだすだけ！


ステップ 1

申込み




ステップ 2

だ液採取

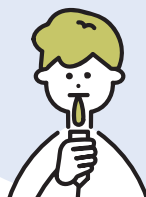

ステップ 3

結果

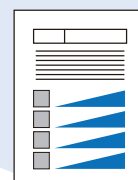

※2～3
週間後

だ液だけで手軽に検査

専用キットを使って簡単にだ液を採取。5分程度で終了しますので、忙しい方でも手軽に検査を受けられます。

体への負担なく検査可能

少量のだ液を採取するだけなので、体への負担がありません。血液検査など痛みが苦手な方でも安心して受けられます。

「今のリスク」が分かるレポート

遺伝子検査のような生涯的可能性ではなく「検査時点でのがんのリスク」についてグラフやチャートでレポートします。

サリバチェッカー®とは？

がんのリスクを手軽に検査できる「だ液によるがんリスク検査」です。

「サリバチェッカー」は、慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究成果をもとに開発した、がんの早期発見が期待できる新しい検査です。だ液中の代謝物を超高感度質量分析装置を用いて測定、解析することで現在がん罹患している可能性を調べることができます。

詳しくは
WEBで
チェック！



サリバテック



がんの種類ごとに

現在のがんリスク

を一度に検査できます。



※女性のみ

湯沢商工会議所会員限定価格でのご案内

公式サイトでお申し込みの場合 ~~26,400~~ 円(税込)

1名につき

会員
特別価格

15,000 円(税込)

(犬っこ共済)

当所生命共済 又は

アクサ生命福祉制度加入事業所様は

さらに!!

12,500 円(税込)

でご提供いたします。



SalivaTech

サリバテックの紹介
動画はこちらから！



裏面もご覧下さい ▶

サリバチェッカー 検査の流れ

手順1 採取キットの中身の確認（キット到着時）



採取および検査所への返送で使用するしますので、検査所への返送まで捨てないでください

※ 一部の方は上記の他、「利用規約」と「同意書」が同梱されている場合がございます

手順2 前日の準備（だ液採取前日）

① 採取前日の夜9時以降※1は水以外の飲食、薬の服用はしないでください※2

※1 採取の12時間前を目安 ※2 薬を服用中の方は事前に医師等にご相談ください

② 保冷ボックス（保冷剤入り）を冷凍庫に入れ、3時間以上おきます

※ 保冷ボックスの中には凍らないタイプの保冷剤が入っています

※ 保冷剤は保冷ボックスから取り出さずにご使用ください



手順3 採取の準備（だ液採取当日）

だ液は午前中に採取してください

① 起床後

口腔内を清潔にするために、採取1時間前までに
歯磨きを済ませてください

× 朝食 × 薬 × 入れ歯安定剤 × ガム、飴、トローチ

への記名

採取容器セットの袋から採取容器を取り出し、氏
名欄に採取される方のお名前を油性ペンでご記入
ください（カタカナでの記名も可能です）

② 採取1時間前

※以下は、控えてください

× 激しい運動 × 喫煙 × うがい薬

× 出血をともなうような口腔内の手入れ
（歯ブラシ、歯間ブラシ、つまようじなど）

③ 採取15分前

コップ半分（100mL）程度の水を飲んでください

※ 他の検査で水分を摂取できない場合は、軽く口をゆすぐ

※ 口紅、リップクリームはだ液採取前にふきとる

④ 同意書の記入

（同封されている方のみ）

利用規約をよく読み、記入例を参照しながら必須
事項をボールペンでご記入ください

※ 1本は予備です（余った場合は破棄）

※ 申込者ごとにIDが割り振られています

同時に複数名が検査する場合は入れ違いにご注意くだ
さい



手順4 だ液の採取（だ液採取当日）

だ液を採取容器へ移し
容器をしめる

- 保冷ボックスを両手で持ち、口にたまっただ液をストロー
を通して採取容器へうつす
- できるだけ保冷剤が採取容器にくっつくようにする
- 採取容器にストローを刺す



手順5 だ液の保存・集荷依頼（だ液採取後）

① 冷凍（12時間以上）

- 保冷ボックスのフタをして保冷ボックスごとだ液を凍らせる
※ 保冷ボックスには採取容器を1つだけ入れてください

② 集荷を依頼


- だ液が完全に凍ったことを確認し、ヤマト運輸へ冷凍便で
集荷依頼

③ 発送準備

- 返送用ボックスの上部中央に冷凍シールを貼り、封シール
で箱を閉じる
- 返送用伝票に必要事項を記載し、返送用ボックスに貼る



お申し込み後の流れ

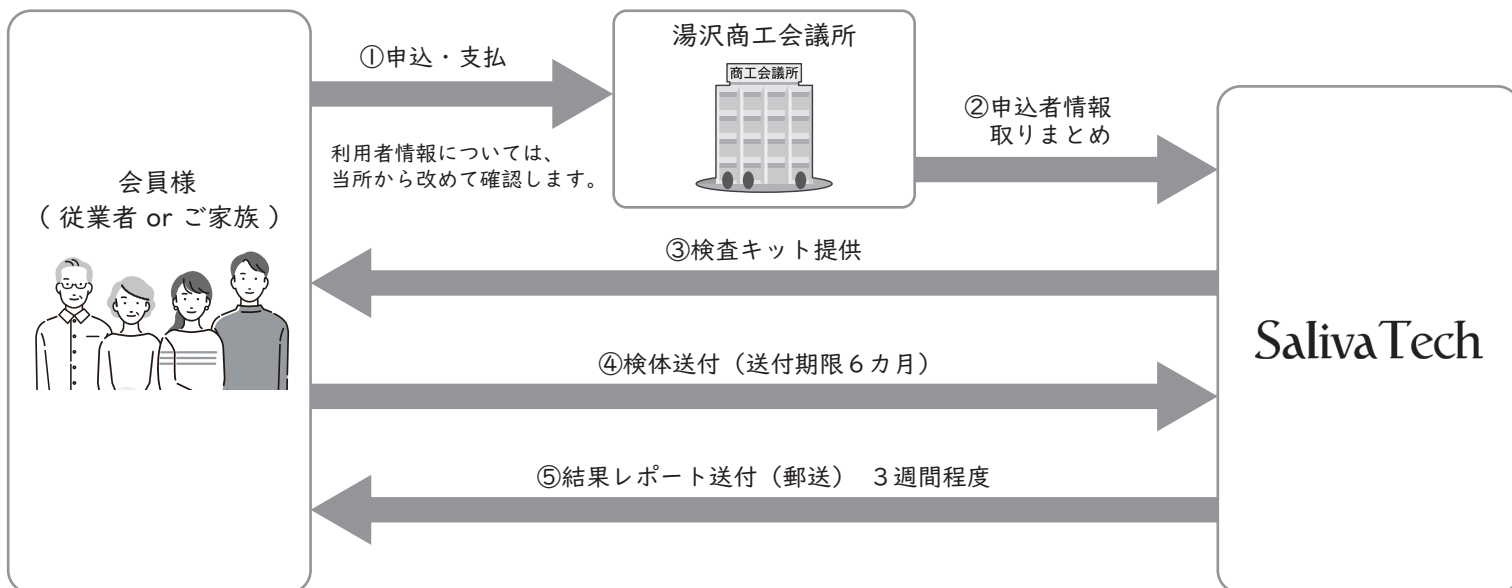

「サリバチェッカー」購入申込書

湯沢商工会議所 行 (0183-73-2900)

「お申込み方法」

下記に必要事項を記入し、FAXにてお送りいただくか、当所ホームページよりお申し込みください。

利用者の情報はお申し込み後、改めて伺います。

申込日	年 月 日
事業所名	
住所	〒
ご担当者名	
電話	() -
E-mail	@
申込者数	名 （ 従業者 名 ／ ご家族 名 ）

※ 検査キットの郵送先は職場・個人宅がそれぞれ選択できます。


※ お申し込み人数確定後、当所より請求書を送付いたします。

【お問い合わせ】 湯沢商工会議所

TEL : 0183-73-6111

FAX : 0183-73-2900

E-mail : yucci@yutopia.or.jp

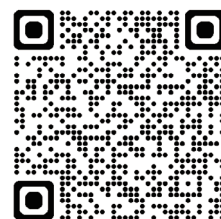

※当所ホームページからも
ご確認いただけます。